

ERGORELAX™ PRO

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Entspannung in nur wenigen Sekunden.

IHRE FERNBEDIENUNG

AUTO-TASTE

Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

USB-ANSCHLUSS

Verbinden Sie das Gerät mit einem 5V USB-Netzteil oder einer Powerbank.

MANUAL-TASTE


- Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste kurz, um zwischen den Funktionen zu wechseln.



IN 3 SCHRITTEN STARTEN

1

ANSCHLIESSEN

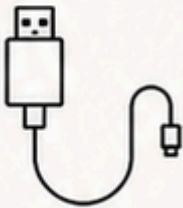

Schließen Sie ErgoRelax™ Pro mit dem mitgelieferten USB-Kabel an ein 5V USB-Netzteil oder eine Powerbank an.

2

EINSCHALTEN



Halten Sie die Auto-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt.

Das Gerät startet automatisch im Komfortmodus und kombiniert Wärme, Massage und Traktion.



Wärme



Massage



Traktion
(Luftkissen)

3

FUNKTION AUSWÄHLEN



Drücken Sie die Manual-Taste kurz, um zwischen den einzelnen Funktionen zu wechseln.



Nur Wärme



Nur Massage



Nur Traktion
(Luftkissen)



EMPFOHLENE ANWENDUNGSDAUER

15 – 30 MINUTEN

Für optimale Ergebnisse täglich anwenden.



TIPP

Für die erste Anwendung empfehlen wir den Komfortmodus. Anschließend können Sie mit der Manual-Taste gezielt zwischen Wärme, Massage und Traktion wechseln.

SICHERHEITSHINWEISE



Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet.



Nicht während Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden.



Anwendung sofort beenden, wenn Schmerzen oder Hautreizungen auftreten.



Nur mit einem 5V USB-Netzteil verwenden.



Nicht mit 12V- oder 24V-Netzteilen betreiben.




Gerät nicht waschen oder in Wasser tauchen.

LIEFERUMFANG



ErgoRelax™ Pro

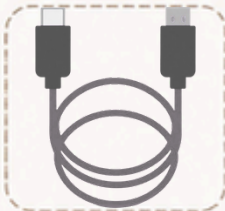

USB-Kabel



USB-Netzteil nicht enthalten

SUPPORT

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.



info@ergo-kissen.com



www.ergo-kissen.com



QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in ErgoRelax™ Pro.

Gönnen Sie sich Ihre tägliche Auszeit.



Hinweis: Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen oder Anwendungen auf.